



## **Bris dekubitusa, bris rane, aspirat apscesa, bris izlazišta fistule, bioptat tkiva, intraoperativni bioptati mikološki**

Uzorci se mogu uzeti u ambulanti Mikrobiološkog laboratorija, ambulantama obiteljske medicine, specijalističkim ambulantama ili bolničkim odjelima.

Uzorak briseva se uzimaju sterilnim vatenim debljim brisom koji se može dobiti na šalteru Mikrobiološkog laboratorija.

Uzorci bioptata se uzimaju u sterilnu posudu na navoj. Za mikološku analizu ovih uzoraka nije potrebno koristiti transportnu podlogu za anaerobe.

Prije uzimanja briseva, sterilni vateni bris se navlaži sterilnom fiziološkom otopinom.

Uzorci se uzimaju na isti način kao što je opisano za bakteriološku analizu.

Uzorak se mora dostaviti na šalter Mikrobiološkog laboratorija unutar 2 sata na sobnoj temperaturi, a u nemogućnosti transporta može se čuvati do 24 sata na sobnoj temperaturi. Za mikološku analizu ovih uzoraka nije potrebno koristiti transportnu podlogu za anaerobe.

Nalaz je završen za 6 radna dana.

Liječnik koji je uputio pacijenta na pretragu može telefonski dobiti informaciju o porastu nakon 48 sata na telefon 653-167 od 7:00 - 15:00 h.

**U nalazu je naziv patogenih gljiva, a u dogovoru sa kliničarem i test osjetljivosti (za primarno sterilne uzorke obavezno).**

**U slučaju da gljive nisu izolirane u nalazu se navodi da je uzorak mikološki negativan.**