



Uzimanje uzoraka za FilmArray Gastrointestinal (GI) Panel

Uzimanje, transport i pohrana uzoraka

Uzorci za pretragu:

- **Stolica u tekućem Cary-Blair transportnom mediju**

Uzimanje uzoraka za pretragu:

- Uzorak stolice uzima se na bolničkom odjelu ili kod kuće te se dostavlja u laboratorij. Stolica se uzima u sterilnu, plastičnu posudu s navojem sa žličicom koja se može dobiti na šalteru Mikrobiološkog laboratorija ili se može kupiti u ljekarni.
- U Mikrobiološkom laboratoriju uzorak stolice priloženom se četkicom prebacuje u posudu s transportnim medijem.

Transport i pohrana uzoraka:

Uzorke bi trebalo što prije obraditi i testirati sustavom FilmArray Gastrointestinal Panel.

Ako je potrebno skladištenje, uzorci stolice/stolice u transportnom mediju se mogu čuvati:

- na sobnoj temperaturi **do 4 dana (18 – 30 °C)**
- u hladnjaku do 4 dana **(2 – 4 °C)**

Ograničenja u izvedbi – osobine uzorka

- **Stolica ne smije sadržavati vodu ili urin.**
- **Test nije validiran za rektalni bris ili uzorak svježe stolice bez medija.**
- **Uzorak se ne smije zamrzavati.**

Izdavanje nalaza

Nalaz je završen u roku **jednog radnog dana.**