



## Uzimanje uzoraka za FilmArray Meningitis/Encephalitis (ME) Panel

### Uzimanje, transport i pohrana uzoraka

#### Uzorci za pretragu:

- **Likvor**

#### Uzimanje uzoraka za pretragu:

- Uzorke iz likvora trebalo bi prikupljati lumbalnom punkcijom i ne bi ih trebalo centrifugirati.
- Minimalni volumen uzorka: za testiranje je potreban uzorak likvora od 0,2 ml (200 µl).
- Uzorak se uzima na bolničkim odjelima lumbalnom punkcijom.
- Uzorak se stavlja u sterilnu epruvetu na navoj koja se može dobiti na šalteru Mikrobiološkog laboratorija.
- Prije vađenja likvora, dezinficira se okolina insercije. Uzorak se punktira u aseptičnim uvjetima.

#### Transport i pohrana uzoraka:

Uzorke bi trebalo što prije obraditi i testirati sustavom FilmArray Meningitis/Encephalitis (ME) Panel.

Ako je potrebno skladištenje, uzorci se mogu čuvati:

- na sobnoj temperaturi najviše 1 dan (18 - 30°C)
- u hladnjaku do najviše 7 dana (2-8°C)

#### Ograničenja u izvedbi – osobine uzorka

- Ne koristiti uzorke dobivene iz šantova.
- Uzorak se ne smije centrifugirati i zamrzavati.

#### Izdavanje nalaza

Nalaz je završen u roku **jednog radnog dana**.