



Uzimanje uzoraka za molekularnu dijagnostiku *Bordetella pertussis*/*parapertussis*

Uzimanje, transport i pohrana uzoraka

Dijagnostika *B. pertussis*/*parapertussis* metodom Real-Time PCR provodi se iz **brisa nazofarinksa** u transportnom mediju (Liquid Amies).

Uzorak se mora dostaviti na šalter Mikrobiološkog laboratorija u posudicama s transportnim medijem unutar 2 sata.

U nemogućnosti transporta može se pohraniti na temperaturi od 2°C do 8°C tijekom 24 sata.

U slučaju duljeg čuvanja, uzorak se mora pohraniti na temperaturi nižoj od -10°C.

Izdavanje nalaza

Nalaz je završen u roku **dva radna dana**.

U nalazu se navodi je li uzorak pozitivan ili negativan na *Bordetella pertussis* i/ili *Bordetella parapertussis*.